

Lifeloc LX9

La Nueva Generación en Equipos Profesionales para medir la Concentración de Alcohol.



Kaßla[®]
Alcohol Testing

Lifeloc
TECHNOLOGIES

LX9
Breathalyzer

Acerca del Alcoholímetro LX9

Un equipo robusto pero a la vez altamente sofisticado, que se diseñó pensando en los programas de alcoholimetría que se realizan en la vía pública con la intención de controlar la posible presencia de conductores automovilísticos en estado de ebriedad.



El Alcoholímetro LX9 es la más nueva generación de alcoholímetros de Lifeloc Technologies, el fabricante Estadounidense #1 en Equipos Portátiles de detección de alcohol en aliento. Al adaptar tecnologías tales como GPS para conocer la geocalización en tiempo real del instrumento, Bluetooth para vincularse a impresoras y teclados portátiles Lifeloc, así como un diseño innovador que permite utilizarlo en 360 grados para comodidad del operador, gracias a su boquilla rotatoria.

Características del Alcoholímetro LX9

Comunicación Inalámbrica: Conectividad Bluetooth con impresoras y teclados inalámbricos para pruebas realmente móviles.

GPS Incorporado: Proporciona información de ubicación precisa para cada prueba y se guarda como para mantener un registro.

Entrada de Datos: Permite la captura de números y nombres a partir de su teclado direccional de 5 botones, permitiendo hasta 20 campos de datos que son personalizables y altamente flexibles (Licencia, Número de Operador, Nombre del Sujeto, Departamento, Motivo de la Prueba, Etc).

Múltiples modos de Prueba

Modo Automático: La forma más fácil de realizar una prueba. En este modo la unidad toma una muestra automáticamente en el momento propio de la exhalación, se utiliza una boquilla y se registran resultados cuantitativos.

Modo de Prueba Manual: Permite al operador decidir el momento ideal para tomarla muestra de aliento, es ideal para casos de personas con poca capacidad respiratoria se utiliza una boquilla y se registran resultados cuantitativos.

Modo de Prueba Pasiva: Este modo verifica automáticamente la presencia del alcohol en el aliento, sin necesidad de boquilla .

Prueba Pasiva No Auto: Tampoco se requiere boquilla y se utiliza al detectar la presencia del alcohol en el ambiente o bien en un recipiente.

LX9

Alcoholímetro de celda de combustión con impresora, boquillas, cargador, teclado y estuche uso rudo.

PANTALLA DE COLOR Y 2,2 PULGADAS

Una pantalla de 2.2 Pulgadas que Visible a la luz del día o en la oscuridad. Ofrece indicadores, del número de prueba, hora, vida de batería, bluetooth y GPS

BOQUILLA GIRATORIA A 360°

Permite girar 360° a cualquier posición, para que el operador elija la más segura.

INTELIGENTE, ROBUSTO Y SEGURO

Almacena hasta 10,000 pruebas en memoria, otorgando historial de todas las pruebas, calibraciones y verificaciones; las cuales están protegidas por una contraseña y con ajustes programados por el usuario.

DISEÑO ERGONÓMICO

Su diseño robusto y resistente soporta los rigores del uso diario y además permite un Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -10° a 55°C (14° a 130°F).

Su diseño inteligente a partir de una boquilla giratoria, permite utilizarse 360 grados, en la posición más conveniente para el examinador.

Eliminaría lo del Bluetooth

Conectividad Total: A partir de su protocolo de comunicación Bluetooth 4.1 de bajo consumo de energía, el equipo permite una movilidad total.

INNOVACIÓN EN ALCOHOLIMETRÍA:

Carga rápida de baterías NiMH u opción de baterías alcalinas AA.

Boquilla giratoria 360°

Flujo Respiratorio mientras el sujeto sopla en la boquilla, el LX9 mostrará el flujo de respiración en la pantalla.


Curva de Alcohol: En caso de detectar alcohol, el nivel se grafica y se mostrará antes del resultado.



Modo de Empleo



Encienda el equipo

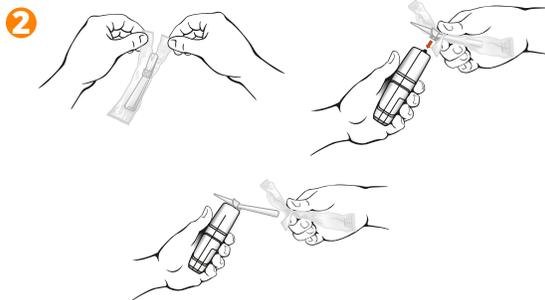

Coloque la boquilla en la parte posterior del aparato.



Pida a la persona que sopla en la boquilla firme y prolongadamente durante el mayor tiempo posible.

4



A medida que el sujeto sopla en la boquilla, el LX9 revelará gráfico del flujo de aliento en la pantalla.



Si el LX9 detecta alcohol, el nivel de alcohol se grafica y se revelará antes del resultado de la prueba.



Después de graficar el alcohol, se muestra el resultado. El resultado permanecerá en la pantalla hasta que se presione el botón de Encendido o hasta que se apague automáticamente.

Información para Pedidos

Catálogo	Formato	Contenido
11312	Alcoholímetro Lifeloc LX9	Alcoholímetro con Bateria Recargable , Cable tipo C, Cable Cargador Alcoholímetro (100-240VCA), (25) Boquillas, (1) Boquilla Cónica, Manual de Usuario y Estuche Uso Rudo.
11313	Alcoholímetro Lifeloc LX9 BT Kit	Alcoholímetro con Bateria Recargable, Cable tipo C, Cable Cargador Alcoholímetro (100-240VCA), Impresora Bluetooth Lifeloc, Cable Cargador Impresora (100-240VCA), (25) Boquillas, (1) Boquilla Cónica, Manual de Usuario y Estuche Uso Rudo.
11315	Alcoholímetro Lifeloc LX9 DMS BT Kit	Alcoholímetro con Bateria Recargable, Cable tipo C, Cable Cargador Alcoholímetro (100-240VCA), Impresora Bluetooth Lifeloc, Cable Cargador Impresora (100-240VCA), Teclado Bluetooth, (25) Boquillas, (1) Boquilla Cónica, (1) Manual de Usuario y (1) Estuche Uso Rudo.
13050	Boquillas para LX9 Modelo L360	Paquete de 150 Boquillas en empaque individual.
13048	Boquillas para LX9 Modo Pasivo Series L	Paquete de 5 boquillas.

KABLA DIAGNÓSTICOS

Oficina Monterrey (Matríz)

Teléfono: (81) 4444 1001
Loma Blanca #2900 Col. Deportivo Obispedo
Monterrey N.L. C.P. 64040

Oficina Ciudad de México

Teléfono: (55) 9130 0575
Av. Revolución #356 4to Piso, Col. San Pedro de los Pinos,
Ciudad de México. C.P. 03800

Oficina Guadalajara

Teléfono: (33) 4040 1449
Bruselas #626, Col. Moderna Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190
www.kabla.mx